



LOOTHIER®

HANDCRAFTED WHEELCHAIRS

**MANUAL DE USUARIO
RIGID PRO**

NºSERIE:



Producto conforme a la directiva europea
93/42/CEE relativa a productos sanitarios.



Sergi Bohigas Serra
Centre d'empreses nau 5. 17178 Les Preses (Girona)

DESCRIPCIÓN

La silla de ruedas que acaba de adquirir está diseñada y fabricada a mano específicamente para usted. para obtener el máximo nivel de funcionalidad, confort y adaptabilidad a sus necesidades y requerimientos.

USO PREVISTO

El producto está indicado a proporcionar movilidad a personas que tengan una limitación en la posición bípeda o la marcha. El usuario previsto debe tener las habilidades físicas y mentales para el uso de este producto de manera segura. A partir de 12 años de edad y con un peso de ocupante no mayor al indicado en la etiqueta. La silla de ruedas no está diseñada para el uso de actividades abusivas o excesivas a parte del uso previsto.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Nunca exceda el límite máximo de carga.
- Tome el tiempo y el espacio necesario para acostumbrarse al uso de su nueva silla de ruedas.
- Solamente utilice el producto en zonas destinadas para ello o transeúntes.
- No intente utilizar el producto en las escaleras, escaleras mecánicas, así como en superficies no seguras
- El usuario debe ser consciente de sus habilidades. La silla de ruedas puede volcar incluso en superficies sin desnivel. Además, tenga cuidado con el uso de mochilas o cambios en el repartimiento del peso esto puede afectar a la estabilidad.
- La silla no ha pasado ningún crash-test entonces es mejor no utilizarla durante el uso de vehículos a motor. Siempre haga la transferencia al asiento del vehículo.
- Tenga cuidado de no dejar la silla en ambientes muy calurosos o con exposición directa al sol, esto puede aumentar la temperatura del producto.
- Su proveedor le entregará la silla de ruedas lista para su uso, y le mostrará las opciones principales.
- Si necesita realizar algún ajuste diríjase a su punto de venta o técnico de referencia.

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO

Siempre compruebe que el producto no ha sufrido ningún daño durante el transporte. Asegúrese de que todos los componentes están en correctas condiciones antes del uso de la silla de ruedas.

Instale las ruedas tal y como está descrito en los apartados posteriores.

Ajuste los frenos tal y como está descrito en los apartados posteriores.

MANUAL DE USO

Evite la conducción en pendientes, puede hacer la silla de ruedas inestable.

Ponga el peso hacia adelante cuesta arriba para mantener la estabilidad. Cuesta abajo, mantenga el peso hacia atrás para controlar la estabilidad y los obstáculos.

Tenga cuidado de no atrapar la mano o los dedos en los radios de las ruedas.

Cuando esté parado o haciendo una transferencia, asegúrese de accionar los frenos.

Tenga cuidado al alcanzar objetos, podría provocar inestabilidad en la silla.

EXTRAER LAS RUEDAS

Presione el botón negro del eje de la rueda y tire de todo el conjunto hacia atrás. Para instalar la rueda, pulse el botón e inserte el eje en el receptor y suelte el botón. Asegúrese de que la rueda se ha instalado correctamente tirando de ella.

AJUSTE EJE RUEDAS TRASERAS

El eje de las ruedas traseras viene ajustado en longitud de serie. Si usted necesita reajustar la longitud del eje para su fijación, utilice dos llaves inglesas para girar la tuerca y así ajustar la longitud hasta que el eje quede totalmente ajustado.

FRENO DE LAS RUEDAS TRASERAS

Para el uso del freno estándar Push to Lock, tire de la palanca del freno hacia adelante. Asegúrese de que la rueda queda completamente frenada. Para desbloquear las ruedas tire de la palanca del freno hacia atrás.

Para el uso del freno compacto de tijera, tire de la palanca del freno hacia afuera. Asegúrese de que la rueda queda completamente frenada. Para desbloquear las ruedas tire de la palanca del freno hacia dentro.

Asegúrese siempre de que el freno está correctamente ajustado y de que realiza su función. Para ajustar el freno afloje los dos tornillos del anclaje ajuste la posición del freno y reapriete los tornillos.

AJUSTE DEL CENTRO DE GRAVEDAD

Levante la silla del suelo para evitar que las ruedas ejerzan ninguna fricción. Afloje los 4 tornillos indicados en la imagen. Mueva el conjunto hasta su posición deseada. Inserte los tornillos y apriete. Vuelva a poner la silla en su posición original, y reapriete los tornillos.

TUBO CAMBER

El tubo camber viene ajustado de serie. Afloje los 2 tornillos indicados en la imagen. Mueva el conjunto hasta su posición alineada. Reapriete los tornillos.

HORQUILLAS

Las horquillas de las ruedas delanteras vienen ajustadas y selladas de serie. Si nota que la horquilla está floja, retire el tapón y con una llave de tubo y una llave inglesa reapriete el conjunto hasta tener la dureza deseada. Aplique siempre sellante para tornillos.

RUEDAS DELANTERAS

Si usted quiere cambiar las ruedas delanteras, con la ayuda de dos llaves allen desmonte el eje de la rueda, cambie las ruedas y vuelva a colocar el eje. Reapriete los tornillos. Utilice sellante para tornillos.

REPOSAPIÉS

El reposapiés viene ajustado a su altura de serie, aún así si quiere reajustar siga los siguientes pasos. Afloje los tornillos de las abrazaderas y coloque el reposapiés a su altura deseada, asegúrese de que está nivelado izquierda-derecha. Reapriete los tornillos.